


# Kit de Surveillance Cardiaque

## Mode d'emploi



## INSTRUCTIONS

- Veillez à ce que votre **peau soit sèche et rasée** au niveau de la zone du sternum
- Ouvrez l'une des enveloppes métallisées **contenant le patch**, séparez soigneusement le patch de la protection et **fixez-le sur votre sternum** comme le montre l'image ci-contre (la partie large du patch doit se trouver en haut). Assurez-vous que le patch soit bien fixé sur la peau et qu'il ne bouge pas. Le second patch est une pièce de rechange.
- S'il n'est pas inséré, **connectez le dispositif à l'adaptateur**. Une fois réunis, **fixez-le au patch** en un clic. Assurez-vous qu'il ne bouge pas.
- Pour allumer le dispositif, **pressez le bouton central pendant environ 2 secondes**. Vous allez entendre un bip pour vous indiquer que l'appareil commence à enregistrer les signaux électriques de votre cœur (si vous vous regardez dans un miroir, vous verrez une lumière **verte clignoter toutes les 20 secondes environ**).
- Pour plus d'informations sur l'électrode et le capteur ECG Bittium Faros™, veuillez consulter le guide rapide de fabricant.

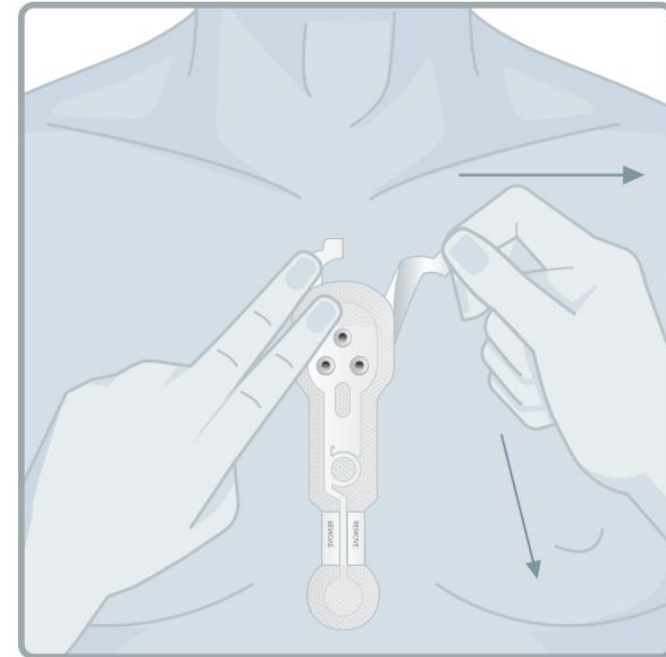

## PENDANT LA PHASE DE SURVEILLANCE

Portez le kit sur vous à tout moment durant la période de surveillance (24 heures) et menez vos activités quotidiennes (travail, sport, sommeil...) normalement. Sachez que le contact du dispositif avec des ballons/coups n'est pas recommandé. Vous pouvez vous doucher avec problème grâce à sa fonction waterproof. Plus vous enregistrerez des battements, plus vous obtiendrez des données et plus le rapport final sera précis et qualitatif.

## À LA FIN DE LA SURVEILLANCE

- Éteignez le dispositif. Pour ce faire, pressez et maintenez le bouton central enfoncé pendant environ 8 secondes. Vous allez entendre trois bips vous indiquant que l'appareil s'est éteint correctement.
- Déconnectez l'appareil et l'adaptateur du patch. Le patch usagé est jetable, mais veillez à renvoyer le second si vous ne l'avez pas utilisé.
- Remettez le kit (appareil + adaptateur + patch de rechange) à votre coordinateur local.
- A réception des données par IDOVEN, l'équipe analysera les résultats, que vous recevrez par email.

Pour tout problème ou question éventuels : Email - [fifpro@idoven.ai](mailto:fifpro@idoven.ai)

AVIS LÉGAL :  
IDOVEN 1903, S.L ne garantit pas le diagnostic médical ou la détection de pathologies, maladies ou autre problème de santé, étant donné que les services apportés par l'utilisation du kit de surveillance ont une visée uniquement préventive. L'orientation médicale préventive proposée par IDOVEN ne remplace en aucun cas l'examen physique ou la visite médicale en personne. Si vous vous sentez mal, rendez-vous immédiatement, en urgence, dans un centre médical. Vous pouvez consulter toutes les informations sur <https://idoven.ai/pages/terminos-de-servicio>. Les produits (électrodes et capteurs) sont soumis à la responsabilité du fabricant. Pour plus d'informations sur le fabricant, le mode d'emploi, les possibles contre-indications et effets secondaires, veuillez consulter le Guide rapide de l'électrode et le capteur ECG Bittium Faros™. Les produits disposent du marquage CE et se classent comme dispositifs médicaux de classe IIa.

## Que dois-je renvoyer ?



L'appareil  
(Bittium Faros™)



L'adaptateur